

Holter de ECG medilog[®]AR



El sistema holter perfecto para la práctica clínica habitual o para estudios avanzados de electrofisiología

Es el único holter que graba hasta **14 días continuos** sin tener que cambiar la batería AAA ni recargar la batería interna.

Frecuencia de muestreo de 32,000 Hz por punta y resolución de 15.5 bits en HD.

Fácil comprobación de la calidad de la señal de ECG en 3 canales.


Sólo se necesitan 2 botones para operar el equipo. ¡Sencillez absoluta!

Un tamaño pequeño para un gran equipo:
83 x 60 x 18 mm.
Peso: 125g.

Puede iniciar el estudio desde la misma grabadora o desde su computadora.

La grabadora está disponible en dos versiones:
Office y Enterprise.

Cables de paciente intercambiables con 5 o 7 puntas.

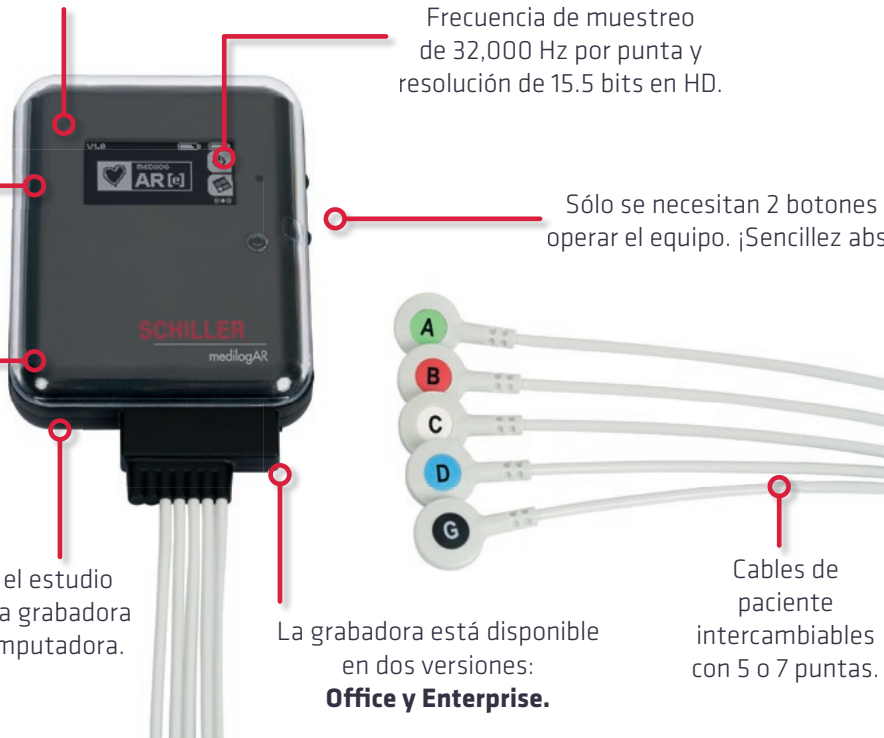

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- ❖ Supresión de artefactos.
- ❖ **Preamplificación de trazo en la grabadora con detección real de la onda P.** Esto le brinda detección directa de fibrilación o flutter auricular.
- ❖ **Preamplificación de los complejos electrocardiográficos en la grabadora.** Disminución de ruido.
- ❖ **Acelerómetros tridimensionales.** Detección en movimiento en 3D que le permite obtener una grabación más limpia.
- ❖ Detección de respiración a partir del ECG.
- ❖ **Detección de SpO₂** (opcional).
- ❖ Frecuencia de muestreo de 32,000 Hz con resolución de 15.5 bits y ancho de banda 0.05 - 250 Hz. Ideal para pacientes adultos y pediátricos.



* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país.
Por favor contacte a su representante SCHILLER, con gusto le atenderá cualquier duda.

Solicite una demo o información adicional en:

schillerlatam.com

info@schilleramericas.com



SCAN ME

**Su avanzado software medilog® DARWIN2
le permite interpretar un estudio en pocos minutos**



SCHILLER
The Art of Diagnostics



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Resistente a las salpicaduras y a los impactos (protección IP 22).
- El equipo graba hasta 14 días continuos sin necesidad de cambiar la batería AAA ni recargar la batería interna, por lo que puede pasar el holter de un paciente a otro sin tiempos de espera. Esto le permite realizar más pruebas y sacarle el máximo provecho a su inversión.
- El equipo cuenta con conexión Bluetooth para facilitar que el usuario descargue los estudios en su computadora.

EPISODIOS DE RESPIRACIÓN

Gracias al registro de respiraciones derivadas del ECG, el **Holter medilog®AR** puede detectar posibles episodios respiratorios durante el sueño. El sensor opcional de SpO₂, conectado por Bluetooth, permite registrar información respiratoria adicional.

MUCHO MÁS QUE DETECCIÓN DE ARRITMIAS

La localización de la fibrilación auricular en cero segundos, el análisis de los episodios respiratorios y la variabilidad de la frecuencia cardíaca son sólo algunas de las extraordinarias funciones del **Holter medilog®AR**. El análisis retrospectivo se realiza con el reconocido software **medilog®DARWIN2**.

Especificaciones técnicas

EQUIPO

Dimensiones: 83 x 60 x 18 mm.

Peso: 125 g aprox. sin batería AAA.

Protección contra la entrada de agua: IP22.

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación:

• 1 batería AAA de 1,5 V desechable o de NiMH de 1,2 V recargable.

• 1 batería Li-Ion de 3,7 V y 1000 mAh (batería interna).

Corriente de carga: Máx. 450 mA Voltaje de carga: 5 V.

Tiempo de carga: 0 a 80%: aprox. 2 h.

Capacidad de la batería: >14 días.

INTERFACES

Bluetooth 2.1, 3.0, 4.0 LE.

Interfaz microUSB.

Protocolo: Dispositivo de almacenamiento masivo.

Velocidad de transferencia: Aprox. 150 segundos durante un registro de 24 horas.

AMPLIFICADOR DE ECG

Resolución: 15,5 bit.

Velocidad de muestreo: 8000 a 32000 Hz.

Sobremuestreo: máx. 128x.

Velocidad de registro: 250 Hz.

Velocidad de registro en modo científico (Enterprise): 1000 Hz

Ancho de banda: 0,05 - 250 Hz.

Banda ancha analógica: >1,0 kHz.


Banda ancha dinámica: 12-14 mV, normalmente 13 mV.

Análisis de resolución en tiempo real de R máx.: 62,5 µs.

Análisis de resolución en tiempo real de P máx.: 500 µs.

Análisis de resolución en tiempo real de marcapasos: 62,5 µs.

Software para Holter medilog® DARWIN2

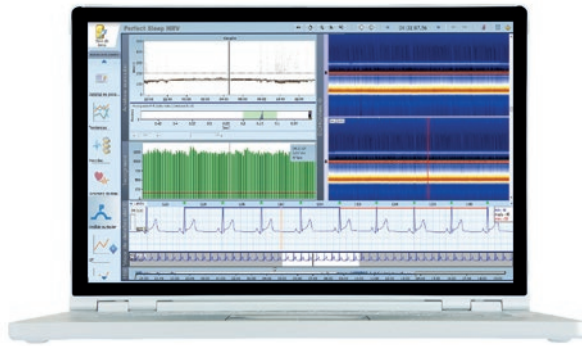

EchoView para análisis de la Afibrilación auricular y bloqueos AV



Resumen tabular de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca en dominio del tiempo



Directorio de arritmias de forma gráfica

SOFTWARE DE ANÁLISIS HOLTER medilog® DARWIN2

La grabadora **medilog AR®** utiliza este potente software, exclusivo de **SCHILLER**, que le brinda numerosas ventajas:

- **medilog® DARWIN2** le permite interpretar un estudio en poco tiempo.
- Directorio de ruidos, que permite al usuario excluir de forma automática la interferencia o artefactos en el análisis.
- Extraordinaria precisión en clasificación de latidos normales o ventriculares gracias al proceso **medilog® ADAPT**.
- Revisión de morfologías por cascada o superposición, con fácil edición Drag and Drop.
- Reclassificación de morfologías en grupo o individualmente.
- Detección y clasificación automatizada de arritmias.
- Tiras de ritmo con selección manual o automática de impresión.
- La más alta sensibilidad en la detección de Fibrilación Auricular independientemente de la irregularidad del ritmo.
- Medición QT de alta confiabilidad gracias al exclusivo algoritmo de detección del final de la onda T.
- QTc programable a partir de las fórmulas de Sagueie, Bazett, Friedericia o Pfeufer.
- Medición de pendiente y nivel de segmento ST manual o automática con presentación de ECG tipo "cine" o evento por evento.
- Revisión directa de tendencia del segmento PR para localización inmediata de bloqueos AV.
- Resumen tabular de arritmias con posibilidad de visualización individual de los diferentes eventos.
- Despliegue completo del estudio con identificación rápida de cada evento mediante código de color.
- Reporte final y resumen configurables según las preferencias del usuario.
- Analiza la Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en dominio de frecuencia.
- Análisis de la respiración a través de ECG (EDR).
- **DARWIN2** está disponible en dos versiones: **Office y Enterprise**.
- **Echoview**. Es una herramienta gráfica que permite identificar rápidamente cambios en los intervalos QT, PR y segmento ST. Además ayuda a identificar fibrilación auricular y bloqueos AV.

* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país.
Por favor contacte a su representante SCHILLER, con gusto le atenderá cualquier duda.




Solicite una demo o información adicional en:

 schillerlatam.com

 info@schilleramericas.com



Software Fuego de Vida

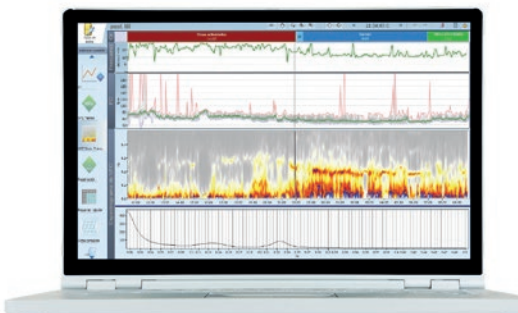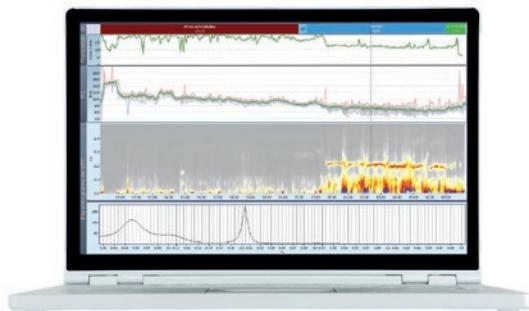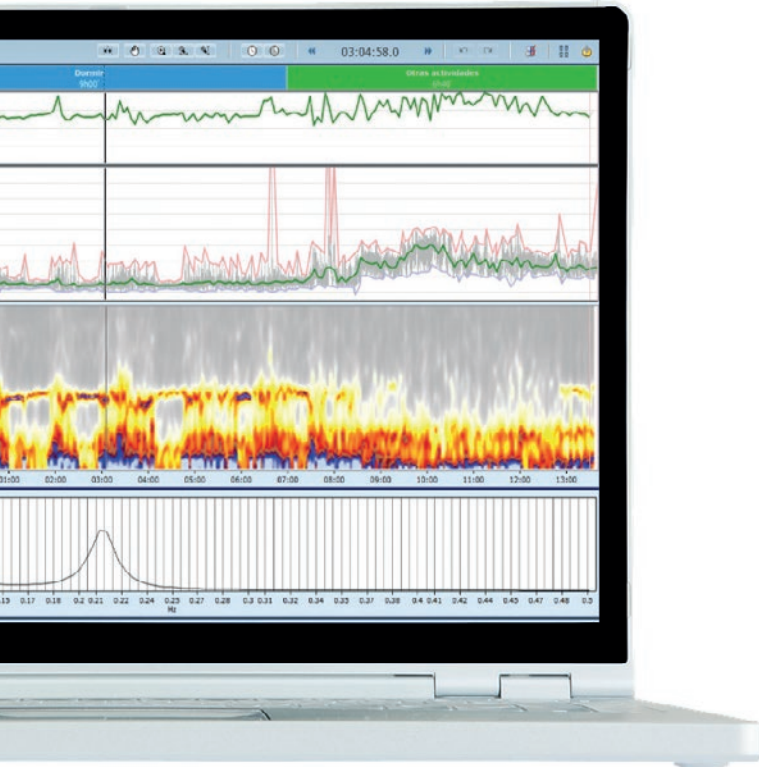

SOFTWARE FUEGO DE VIDA, EXCLUSIVO DEL medilog® DARWIN2

El **Fuego de Vida** es una asombrosa función disponible en el poderoso Software de Análisis **medilog® DARWIN2**.

Este software analiza la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca en Dominio de Frecuencia (VFC), codificándola por color de acuerdo a la energía para construir la gráfica. Es decir que las altas energías se ven en rojo, morado y azul y las bajas en amarillo, color crema y gris; a esta gráfica le llamamos **Fuego de Vida**.

REFLEJO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Nuestro software muestra en el **Fuego de Vida** tiempo y frecuencia de las regulaciones simpáticas y parasimpáticas. Eso permite realizar un análisis profundo y rápido de cómo está funcionando el sistema nervioso central, incluyendo calidad, cantidad y patrón de sueño, ciclo circadiano, etc.

La VFC es un valor importante para evaluar el sistema nervioso autónomo. Una VFC baja puede indicar un incremento del riesgo de muerte. No obstante, es importante garantizar que la medición de la VFC es fiable y que no se ve influida por imprecisiones causadas por el equipo.

El **Fuego de Vida** le ayuda a observar cómo reacciona el cuerpo humano ante el estrés y la recuperación. Esto indica si las acciones terapéuticas o los cambios en el estilo de vida influyen con éxito en la reducción del estrés o en la mejora de la recuperación.

Esta función es útil para diversos especialistas de distintas maneras porque les permite ver causas y efectos de ciertas patologías. Algunos de los especialistas que pueden aprovechar el análisis de **Fuego de Vida** son: ginecólogos, electrofisiólogos, cardiólogos, endocrinólogos (especialmente diabetólogos) y geriatras.

Solicite una demo o información adicional en:

 schillerlatam.com

 info@schilleramericas.com



SCAN ME

* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país.
Por favor contacte a su representante SCHILLER, con gusto le atenderá cualquier duda.